




Flexima®

POSLEDNÍ GENERACE STOMICKÝCH POMŮCEK
V JEDNODÍLNÉ MODELOVÉ ŘADĚ

Flexima[®] uzavřené sáčky

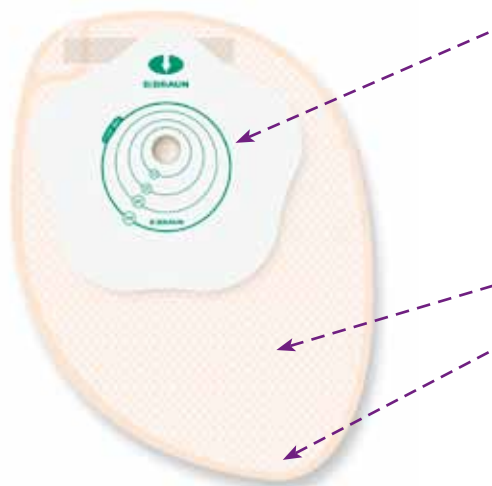

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

- Hydrokoloidní lepicí podložka tvaru květu, která se přizpůsobuje přirozeným záhybům kůže
- Základní otvor lze posunout vzhůru
- Více lepidla pod stomií na místech, kde je ho většinou třeba
- Délétrvající ochrana

NEJVYŠŠÍ DISKRÉTNOST S NEHLUČNOU PLASTOVOU FÓLIÍ

NAVRŽENÝ PRO POHODLÍ

- Velmi měkký materiál, netkaná textilie v kontaktu s kůží
- Ergonomický tvar sběrného sáčku se přizpůsobuje tříselné krajině

Délka dráhy průchodu plynů



OPTIMALIZOVANÁ SCHOPNOST ODSTRANĚNÍ PLYNŮ A DEZODORIZACE

Chráněný odchod plynů

- Filtr je kompletně začleněn do sběrného sáčku
- Bez kontaktu s oděvem

Flexima[®] Uro

SÁČKY NA MOČ S NOVÝM SYSTÉMEM VYPOUŠTĚNÍ



otevřené



zavřené



MIMOŘÁDNĚ BEZPEČNÝ

NAPROSTO ZŘEJMÉ POZICE OTEVŘENÉ/ZAVŘENÉ

PERFEKTNÍ TĚSNOST UZÁVĚRU

- Žádné zbylé kapky

SNADNÁ MANIPULACE

- Snadné ovládání
- Uzavření a otevření - jen na půl otáčky
- Zaoblený tvar

SNADNÉ NASAZENÍ A SEJMUTÍ

SPOLEHLIVOST

- Velmi bezpečné a univerzální napojení
- Průměr výpustné části zvětšen o 20 %

Flexima® výpustné sáčky Flow Control*

NOVÉ INTEGROVANÉ MĚKKÉ UZAVÍRÁNÍ
S MOŽNOSTÍ ŘÍZENÉHO VYPOUŠTĚNÍ STOLICE (FLOW CONTROL)

Krok 1.



Uzavřete
povytažením štítku



Krok 2.

UZAVÍRÁNÍ

Krok 1. Uzavřete povytažením štítku

Symbols vytištěné na štítku slouží k vizuální kontrole bezpečného uzavření (šipka nahoře s tečkovanou čarou pod ní)


- Vodotěsný záhyb: umožňuje dokonalé zadržení tekutin, bez protékání
- Sáček není nutné při manipulaci pro jistotu přehýbat; tekutina nebude při vyprazdňování sáčku stékat zpět ke stomii

Krok 2. Výpustnou část přeložte a bezpečně ji uzavřete pomocí suchého zipu

- Plastický suchý zip a výpustnou část lze snadno očistit



Krok 1.

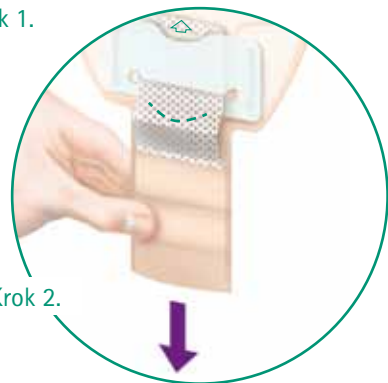

Krok 2.

Zatáhněte, aby došlo k evakuaci stolice

OTEVÍRÁNÍ

Krok 1. Otevřete suchý zip a rozbalte výpustnou část

- Dokonce i při rozbalení výpustné části stolice volně nevytéká ven
- Při obsluze je možné zaujmout vhodnou pozici pro vyprázdnění sběrného sáčku




Krok 2. Zatáhněte za výpustnou část, aby došlo k evakuaci stolice

- Delší dráha evakuace → nižší riziko rozstříkávání

* Systém Flow Control: Patent společnosti B. Braun



JEDNODÍLNÁ MODELOVÁ ŘADA

FLEXIMA® UZAVŘENÉ SÁČKY


	Ø (mm)	Katalog. č.	Kód VZP
Uzavřený sáček béžový 30 ks v balení 	15 - 50*	044015U	0086609
	15 - 70*	044070U	0086615
	25	044025U	0086610
	30	044030U	0086611
	35	044035U	0086612
	40	044040U	0086613
	45	044045U	0086614
Uzavřený sáček průhledný 30 ks v balení 	15 - 50*	044115U	0086608
	15 - 70*	044170U	0086616
Mini uzavřený sáček béžový 30 ks v balení 	15 - 50*	044215U	0086617

* Upravitelný otvor

FLEXIMA® VÝPUSTNÉ SÁČKY

	Ø (mm)	Katalog. č.	Kód VZP
Výpustný sáček s integrovaným uzávěrem a filtrem, béžový 30 ks v balení 	Výpustný sáček Flow Control		
	15 - 60*	044715U	0086618
	25	044725U	0086619
	30	044730U	0086620
	35	044735U	0086621
	40	044740U	0086622
Výpustný sáček s integrovaným uzávěrem a filtrem, průhledný 30 ks v balení 	Výpustný sáček Flow Control		
	15 - 60*	044815U	0086623

FLEXIMA® UROSTOMICKÉ SÁČKY

	Ø (mm)	Katalog. č.	Kód VZP
Urostomický sáček 30 ks + 30 spojek v balení 	12 - 55*	044912U	0086624